Guide de référence rapide

Application Masimo SafetyNet™

AVERTISSEMENT : ne pas effectuer d'auto-diagnostic ou pratiquer d'automédication sur la base des mesures. Toujours consulter un médecin.



> Télécharger et installer l'application Masimo SafetyNet dans :

Google Play



L'App Store



> Lancer l'application et suivre les instructions pas à pas pour créer un compte, participer à un CareProgram™ partagé et commencer à collecter et partager des données.

Pour toute aide ou question supplémentaire, consultez : www.masimo.com/masimo-safetynet



301367/LAB-10721B-0621 EN-LAB-10206C

Connexion, inscription, emplacement, notifications


> Inscription

- Créez un compte en utilisant une adresse électronique ou un numéro de téléphone.
- Si vous avez reçu un CareProgram d'un professionnel de la santé, vous devez vous inscrire par le biais de l'e-mail ou du numéro de téléphone utilisé pour envoyer votre invitation.



> S'assurer que l'emplacement et les notifications sont autorisés pour le bon fonctionnement de l'application.

Emplacement

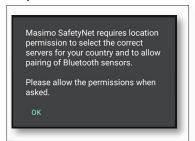




Notifications



www.masimo.com www.masimo.com 2

Autorisations de santé (iOS uniquement)

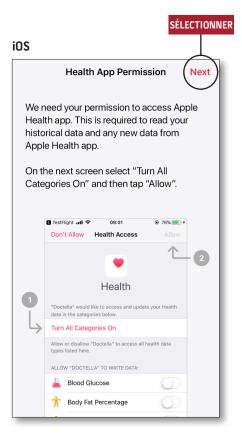

> Suivre les instructions à l'écran : Pour autoriser Masimo SafetyNet à accéder aux et collecter les données de santé à partir de l'appareil.

Centre d'activité

> Menu

Afficher le menu de l'application.

> Dashboard (Tableau de bord)


- Afficher l'écran Dashboard (Tableau de bord), qui comporte les données de santé de l'utilisateur.
- Afficher les données de santé partagées par les autres utilisateurs.

> Sharing (Partage)

- Affiche les prestataires de santé, soignants et membres de la famille avec qui l'utilisateur partage actuellement des données.
- Partage des données avec un autre prestataire de santé, soignant ou membre de la famille.

> CareProgram


 Permet à l'utilisateur d'afficher ou de supprimer un CareProgram.

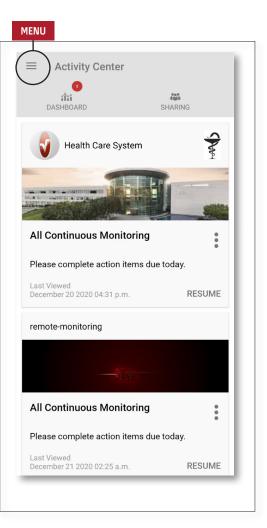

3 www.masimo.com www.masimo.com 4

Menu

• Le menu peut également être consulté en glissant sur l'écran de gauche à droite.

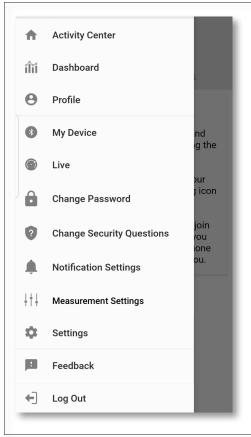

> Settings (Réglages)

- Affiche l'ID de l'utilisateur.
- Permet à l'utilisateur d'activer ou de désactiver l'ID tactile ou l'ID faciale pour se connecter à l'application.
- Affiche les informations de l'application.

> Feedback (Retour)

• Permet à l'utilisateur d'envoyer un e-mail à l'assistance Masimo SafetyNet.

> Log Out (Déconnexion)

 Permet à l'utilisateur de se déconnecter de l'application.

> Activity Center (Centre d'activité)

 Affiche l'écran Activity Center (Centre d'activité).

> Dashboard (Tableau de bord)

 Affiche l'écran Dashboard (Tableau de bord).

> Profile (Profil)

- Affiche les informations du profil d'utilisateur.
- Permet à l'utilisateur de modifier les informations du profil.

> My Device (Mon appareil)

 Permet à l'utilisateur d'ajouter un appareil pour la surveillance.

> Live (En direct)

- Permet à l'utilisateur de consulter les données de l'appareil de surveillance connecté.
- Change Password (Modifier le mot de passe)/Change Security Questions (Modifier les questions de sécurité)
- Permet à l'utilisateur de modifier le mot de passe et/ou les questions de sécurité en cas de perte du mot de passe.

Notification Settings (Paramètres de notification)

 Permet à l'utilisateur de modifier les paramètres de rappels et de notifications de l'application.

> Measurement Settings (Paramètres de mesure)

 Permet à l'utilisateur de modifier les unités de mesure.

Tableau de bord

> Invite (Inviter)

 Permet à l'utilisateur d'inviter d'autres personnes à partager des informations à travers l'application.

> Share (Partager)


 Affiche les prestataires de santé, soignants et membres de la famille avec qui l'utilisateur partage actuellement des données.

> Edit (Modifier)

- Permet à l'utilisateur de réorganiser les données sur le Tableau de bord.
- Afficher les données des 30 derniers jours ou un résumé hebdomadaire.
- > Sélectionner une carte de paramètres pour afficher les tendances, les plages de dates et les données supplémentaires.



CareProgram

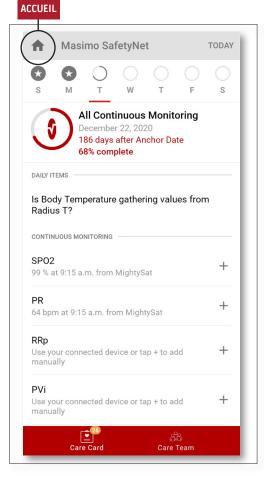


> Care Card (Carte de soins)

- Affiche les données de la carte de soins.
- > Home (Accueil)
- Retour au centre d'activité.
- > Learn (Apprendre)
- Située au bas du CareProgram, cette page permet d'afficher des informations supplémentaires fournies par un personnel soignant.
- > Care Team (Équipe de soin)
- Affiche la liste des prestataires de santé partagés, des soignants et des membres de la famille.

Sharing (Partage)

- > Affiche la liste des prestataires de santé, des soignants et des membres de la famille partagés.
- > Add (Ajouter)
- Partager avec des prestataires de santé supplémentaires.
- Partager avec des soignants ou membres de la famille supplémentaires.
- > Faites glisser un individu partagé pour supprimer ou modifier des privilèges.

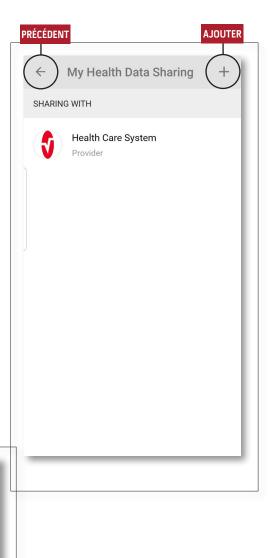

8

AJOUTER

Who do you want to share your health data with?

Healthcare Provider

Caregiver or family member

CANCEL