



Masimo SafetyNet Alert™

Surveillance de l'oxygène et système d'alarme

Guide de démarrage rapide




© 2022 Masimo. Tous droits réservés. 302491/PLM-12987E-0222 EN-LAB-11129E

COMPOSANTS DU SYSTÈME



Puce Masimo

- La puce réutilisable s'insère dans le capteur et communique avec le boîtier de télésurveillance médicale.

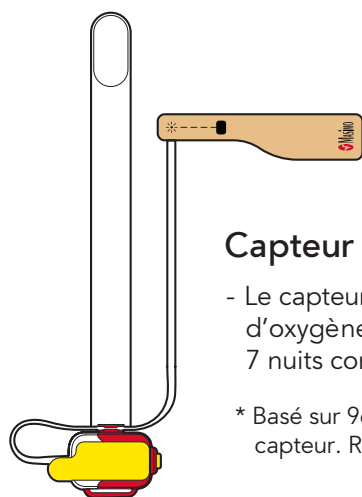

Capteur Masimo

- Le capteur à usage unique mesure le niveau d'oxygène et la fréquence du pouls et dure 7 nuits consécutives.*

* Basé sur 96 heures d'autonomie de la batterie du capteur. Retirez la puce entre les utilisations.




Application Masimo SafetyNet Alert

- Affiche la saturation en oxygène, la fréquence du pouls et d'autres paramètres.
- Le Cloud envoie des alertes au boîtier de télésurveillance médicale et à l'appareil mobile.
- Compatible avec la plupart des appareils mobiles. (appareil mobile non inclus.)



Boîtier de télésurveillance médicale

- Recueille les données du capteur Masimo.
- Envoie les données à l'application pour smartphone.

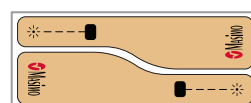

Bandes de remplacement

- Bandes adhésives supplémentaires si besoin.


CONFIGURATION DE L'APPLICATION

1

1. Téléchargez l'application.



2. Branchez le boîtier de télésurveillance médicale à l'alimentation électrique.

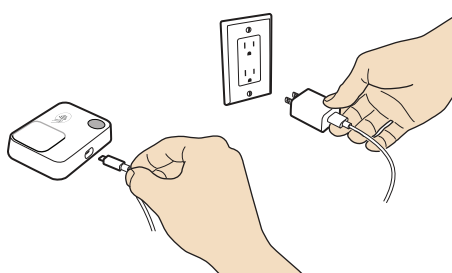

3. Vérifiez que le voyant d'alimentation est allumé.







4. Suivez les instructions étape par étape sur l'application pour configurer le système.



INSTALLATION DU CAPTEUR

2





1. Retirez le capteur de la pochette.
2. Décollez l'étiquette jaune pour activer la batterie.
3. Placez le capteur sur le poignet comme indiqué et faites passer avec précaution l'extrémité de la sangle dans la boucle rouge ouverte.
4. Enroulez l'extrémité libre de la sangle autour du poignet et appuyez pour la fixer.

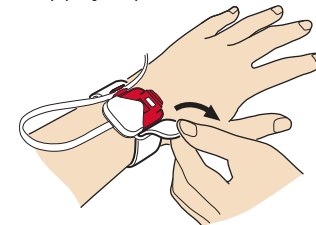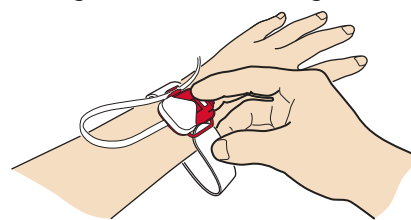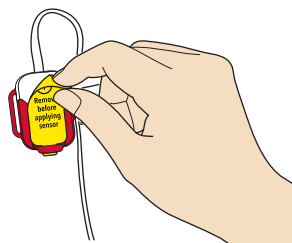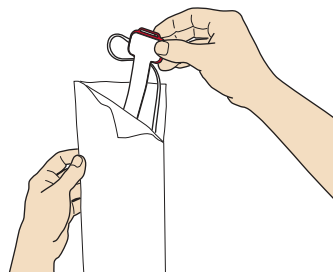

APPLICATION DU CAPTEUR

3





1. Retirez une partie du film plastique et placez l'étoile (*) sur l'ongle de l'annulaire.
2. Enroulez la bande autour du doigt de sorte que le carré noir (■) se situe sur la pulpe du doigt dans l'alignement de l'étoile (*).
3. Appuyez sur le dessus et le dessous du doigt pour fixer la bande.
4. Enlevez le film plastique et enroulez la bande autour du doigt.
5. Ajustez le câble à une longueur confortable.

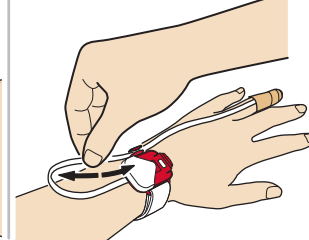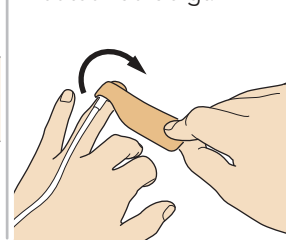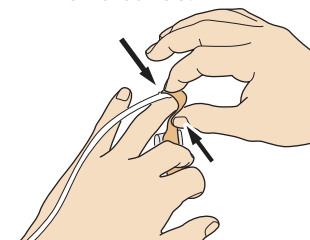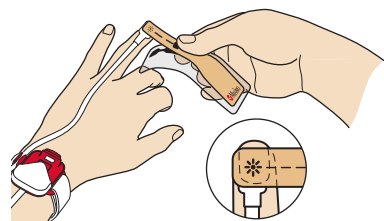

APPAIRAGE ET INSERTION DE LA PUCE

4

1. Maintenez la puce près du boîtier de télésurveillance médicale et attendez le double bip.
2. Insérez la puce dans le compartiment ouvert sur le capteur.
3. Appuyez sur la puce pour la fixer.

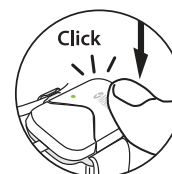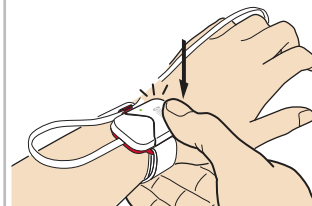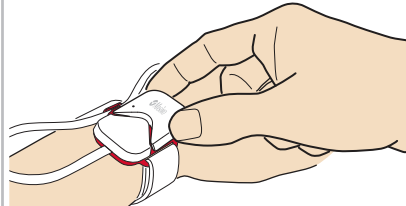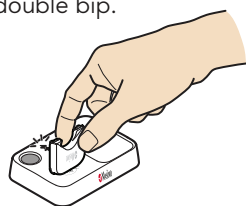

Assurez-vous d'entendre un clic pour confirmer le placement de la puce




Vérifiez que le voyant est allumé pour confirmer la connexion de la puce au capteur

CONFIRMATION DE L'APPAIRAGE

5

1. Une fois la puce insérée, le voyant d'état Bluetooth du boîtier de télésurveillance médicale s'éteint et le voyant d'état devient vert. Le voyant lumineux de la puce devient bleu fixe.

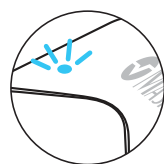

Visitez le site <https://www.mymasimo.fr/produits/masimo-safetynet-alert/> pour accéder à la liste de tous les appareils pris en charge, acheter des capteurs supplémentaires et consulter d'autres ressources, telles que des vidéos et des instructions.

CHANGEMENT DE LA BANDE DE REMPLACEMENT

1. Retirez la bande usagée du capteur
2. Fixez la nouvelle bande dans le même sens que l'ancienne
3. Fixez le capteur au doigt
4. Décollez la bande restante du support

